



Brandenburg, den 16.03.2021

## Laborinformation 05/21

### Anleitung SARS-CoV2-AG-Test

#### Probenentnahme

- Kopf des Patienten nach hinten neigen
- Tupfer unter leichter Drehung ins das erste Nasenloch einführen bis an die Nasenmuschel (kleine Strukturen im Inneren der Nase), bis ein Widerstand auftritt
- Tupfer mehrmals gegen die Nasenwand entlang der Nasenschleimhaut innerhalb des Nasenlochs drehen für insgesamt 10-15 Sekunden
- Vorgang mit dem gleichen Tupfer im anderen Nasenloch wiederholen

#### Inaktivierung

- Vorgefülltes Röhrchen mit 1 ml Inaktivierungspuffer öffnen

#### **Achtung: Puffer muss Raumtemperatur haben**

- Tupfer an den Boden und die Innenwand des Röhrchens drücken und dabei 5 mal drehen
- Tupfer für mindestens 1 Minute im Inaktivierungspuffer belassen
- Tupfer erneut 5 mal an der Innenwand des Röhrchens entlangrollen
- Tupfer aus dem Röhrchen entfernen
- Röhrchen verschließen
- Hände desinfizieren

Prof. Dr. med. O. Frey  
Institutsdirektor